

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

A-CERUMEN

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que A-CERUMEN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre que A-CERUMEN ?
3. Comment prendre que A-CERUMEN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver que A-CERUMEN ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE A-CERUMEN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

A-CERUMEN est conseillé pour l'adulte et l'enfant à partir de 6 mois en usage régulier en alternative des cotons tiges, pour faciliter l'élimination du cérumen, dissoudre les bouchons de cérumen et prévenir leur formation.

HYGIÈNE DES OREILLES – Facilite l'élimination du cérumen et prévient la formation de bouchons

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE A-CERUMEN ?

Ne pas utiliser le produit en cas de perforation du tympan, d'otite et chez les porteurs d'aérateur transtympanique.

Ne pas avaler. Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne. En cas de douleur au niveau de l'oreille, consultez votre médecin. Si les symptômes persistent ou s'accroissent, consultez votre médecin. Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif aux Laboratoires Gilbert - site internet : www.labogilbert.fr et/ ou à l'Autorité Compétente nationale.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

3. COMMENT PRENDRE A-CERUMEN ?

Posologie

- Pour l'hygiène régulière des oreilles : 2 fois par semaine.
- En présence de bouchons de cérumen : 3 à 4 jours de suite, matin et soir.

Mode d'emploi :

1. Pencher la tête du côté opposé de l'oreille à traiter.
2. Instiller la moitié du contenu d'une unidose ou 2 pulvérisations dans l'oreille.
3. Laisser en contact environ 1 minute en massant la base de l'oreille.
4. Pencher la tête pour laisser s'écouler le produit et les résidus de cérumen.
5. Rincer avec du sérum physiologique ou de l'eau claire, et essuyer l'excédent.
6. Reproduire le même procédé dans la seconde oreille si nécessaire, et répéter les étapes 3, 4 et 5.

Précautions d'emploi

A rincer. Ne pas introduire trop profondément l'embout du flacon ou de l'unidose dans le conduit auditif afin de ne pas l'irriter. Éviter le contact avec les yeux.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement-social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER A-CERUMEN ?

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'étui. Ne pas réfrigérer. Conserver à l'abri de la lumière. Conserver à une température comprise entre 10°C et 40°C.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient A-CERUMEN

Tensio-actifs doux (sodium acylsarcosinate et sucrose ester), agent humectant, excipients q.s.p 100%. Formule colorée d'origine naturelle et sans conservateur.

Qu'est-ce que A-CERUMEN, et contenu de l'emballage extérieur

2 conditionnements : étui de 10 unidoses de 2mL ou spray de 40mL.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES GRIMBERG
44 AVENUE GEORGES POMPIDOU
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE

Fabricant/Exploitant :

LABORATOIRES GRIMBERG
ZA DES BOUTRIES, RUE
VERMONT 78704 CONFLANS-
SAINTE-HONORINE FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : MARS 2024

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

+ *code article*