

ActiRhino®

Rhinite allergique

Lire attentivement la notice avant d'utiliser ce dispositif médical et respecter les conseils d'utilisation.

Indication :

Pansement liquide filmogène pour le traitement symptomatique de la rhinite allergique induite par les irritants environnementaux.

Présentation :

Spray de 15 ml (environ 125 pulvérisations)

Composition :

Aqua, Glycérol (3%), HPC (hydroxypropylcellulose), Pollucyanidin-P (dérivé d'extraits de baies de *Vaccinium myrtillus*, de feuilles d'*Hedera helix* et de *Curcuma longa*), Huile Essentielle de *Mentha piperita*, conservateurs alimentaires (Benzoate de Sodium, Sorbate de Potassium, Acide Citrique).

Mode d'action :

Lorsque le spray nasal **ActiRhino® Rhinite allergique** est vaporisé sur la surface de la muqueuse nasale, le produit forme un film osmotique, absorbant, flexible et résistant sur la surface nasale.

Le film **agit instantanément** comme une **barrière protectrice** contre les polluants et allergènes environnementaux (pollen, acariens et poils d'animaux) évitant ainsi qu'ils n'entrent en contact avec la muqueuse nasale. L'action osmotique du film attire et piège les polluants et les allergènes présents sur la muqueuse nasale. Cette action nettoyante favorise la réparation de la muqueuse et ses défenses naturelles. Une muqueuse nasale intacte aide à empêcher l'entrée des particules polluantes dans le corps. L'action combinée de cette barrière filmogène absorbante qui protège, nettoie et réduit l'exposition aux particules polluantes, **soulage les symptômes allergiques et améliore le bien-être quotidien.**

L'efficacité du spray ActiRhino® Rhinite allergique a été cliniquement prouvée dans la réduction des symptômes nasaux (congestion, écoulement nasal, éternuements, démangeaisons), **respiratoires** (toux, respiration sifflante, oppression thoracique) **et oculaires** (rougeur, larmolement, démangeaisons).


Conseils d'utilisation :

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE : Si vous souffrez d'une réaction allergique, appliquez 2-3 pulvérisations dans chaque narine en inspirant très légèrement. Répétez le même processus 3-4 fois par jour.

TRAITEMENT PRÉVENTIF : Avant toute exposition connue à des polluants ou allergènes, vous pouvez utiliser ce produit à titre préventif. Appliquez 2-3 sprays dans chaque narine, de préférence 5 à 15 minutes avant d'être exposé à l'environnement pollué ou à l'allergène. Répétez 2-3 fois par jour.

Mode d'emploi :

- 1 - Nettoyez le nez soigneusement avant d'utiliser le produit.
- 2 - Secouez le flacon.
- 3 - Enlevez le bouchon protecteur.
- 4 - Avant la première utilisation, appuyez sur le pulvérisateur jusqu'à obtention d'un fin nuage de produit.
- 5 - Insérez l'embout nasal à la verticale dans une narine, fermez l'autre narine avec un doigt et pulvérisez le produit en appuyant sur le spray. Répétez le même procédé dans l'autre narine.
- 6 - Nettoyez l'embout nasal et remettez le bouchon après chaque utilisation.

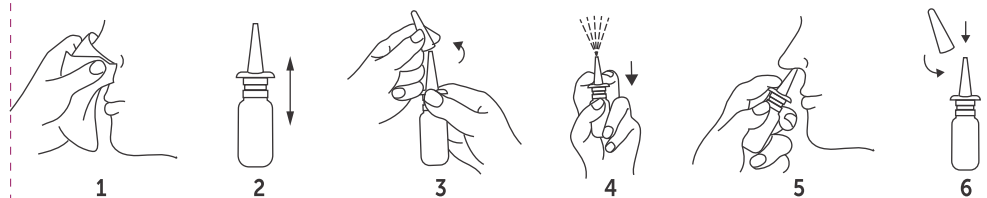

Précautions :

Le produit est destiné à un usage topique (nasal) uniquement.

Maintenir le produit hors de la vue et de la portée des enfants.

Se laver les mains avant utilisation.

Pour des raisons d'hygiène, réserver l'usage de chaque flacon à un seul patient.

Demander l'avis de votre médecin si les symptômes s'aggravent ou en cas d'absence d'amélioration après 7 jours d'utilisation de **ActiRhino® Rhinite allergique**.

Au vu du mode d'action du produit qui participe à rétablir le bon fonctionnement de la muqueuse nasale, le cadre d'utilisation de ce produit ne justifie pas un traitement prolongé au-delà de 3 semaines.

Si les symptômes réapparaissent après 5 jours d'arrêt d'utilisation, le traitement peut être renouvelé selon les recommandations d'utilisation de cette notice.

ActiRhino® Rhinite allergique n'est pas toxique s'il est avalé.

Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau claire.

Ne pas utiliser après la date de péremption, plus de 30 jours après la première utilisation ou si le flacon est endommagé.

Conservation :

Conserver le produit en-dessous de 25°C. Ne pas placer au réfrigérateur et ne pas congeler.

Interactions :

Dû à sa composition et à son mode d'action mécanique et topique, la probabilité d'interaction avec un traitement systémique est extrêmement faible.

Pour une meilleure efficacité, ne pas utiliser d'autre traitement topique par voie nasale 15 minutes avant ou après l'application de ce produit.

Contre-indications :

Vérifier la composition du produit et ne pas l'utiliser si vous êtes sensible ou allergique à l'un des ingrédients.

En l'absence de données de sécurité suffisantes, ne pas utiliser ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement sans avis médical.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans et chez les patients souffrant de troubles respiratoires sévères.

Effets secondaires :

Le mode d'action du spray nasal **ActiRhino® rhinite allergique** est dû à l'osmose instantanée et peut induire une légère sensation de brûlure ou d'irritation au cours des 10-15 premières minutes suivant l'utilisation du produit. Toutefois, si l'irritation ressentie est trop forte et/ou si elle persiste dans le temps avec la même intensité, vous êtes susceptible d'être allergique à l'un des ingrédients et nous vous conseillons de cesser d'utiliser le produit.

Si vous observez une réaction de type allergique suivant l'application du produit (ex : gonflement, sensation de brûlure/irritation forte et persistante), cessez d'utiliser le produit, rincez abondamment le nez avec de l'eau claire et fraîche, et consultez un professionnel de santé si besoin.

Si vous constatez un incident grave lié à l'utilisation de ce produit, merci de prévenir immédiatement le fabricant / distributeur et l'autorité compétente de l'Etat dont vous dépendez.

Conditions d'élimination du dispositif :

Le flacon peut être jeté avec les ordures ménagères. Le capuchon, la notice et la boîte en carton doivent être éliminés conformément aux réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination.

Année d'apposition du marquage CE : 2019



Fabricant : VITROBIO SAS – ZAC de Lavour – 63500 ISSOIRE - France



Distributeur : Laboratoires GRIMBERG – 5 rue Vermont – 78700 Conflans-Sainte-Honorine - France

Information médicale et matériovigilance :

0 809 108 155 Service & appel gratuits

infomedicale@laboratoires-grimberg.com



Dispositif médical

D3-89-02 / Grimberg
VACN0672-V1

GRIMBERG
Laboratoires